

SoftMed

Bandaż kohezyjny - instrukcja użytkowania

OPIS

- ◇ Jednowarstwowa włókninowa opaska kohezyjna- samoprzylepna (nie ma potrzeby stosowania zapinek), można stosować także do owłosionej skóry itp.
- ◇ Oddychająca
- ◇ Jest produktem wspomagającym proces leczenia
- ◇ Może być dzielona na mniejsze odcinki, możliwość rozerwania w rękach bez konieczności używania nożyczek
- ◇ Dostępna w kilku kolorach, z nadrukiem lub bez
- ◇ Dostępne rozmiary: 2,5cm x 4,5m; 5cm x 4,5m; 7,5cm x 4,5m; 10cm x 4,5m; 15cm x 4,5m
- ◇ Opakowana w folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem, odwinieciem i zwilgoceniem, na foli nadrukowane są niezbędne informacje dotyczące produktu.



UROMED
POLAND S.C.

ZASTOSOWANIE

- ◇ Mocowanie opatrunku, zwłaszcza w miejscach w których tradycyjny bandaż mógłby się zsuwać
- ◇ Mocowanie wenflonów
- ◇ Mocowanie szyn unieruchamiających
- ◇ Tworzenie opatrunku kompresyjnego

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Miejsce aplikacji powinno być oczyszczone i wysuszone.
2. Należy odpowiednio dobrać rozmiar bandaża do miejsca aplikacji.
3. Opatrunek pierwotny, który bandaż ma podtrzymywać powinien być założony bezpośrednio na ranę zgodnie z zasadami aseptyki. Jeśli bandaż nie jest wykorzystywany do podtrzymywania opatrunku należy pominąć ten punkt
4. Wyjąć bandaż z opakowania
5. Założyć bandaż na miejscu docelowym tak, aby jego kolejne warstwy zachodziły na siebie, co pozwoli na utrzymywanie się bandaża poprzez działanie kohezyjne.
6. Jeśli bandaż jest zbyt długi, należy przyciąć go do pożądanej długości.
7. Wolny koniec bandaża należy docisnąć palcami do poprzednich warstw opatrunku, upewniając się, że przylegają do siebie i tworzą bezpieczne połączenie.
8. Skontrolować, czy opatrunek nie uciska zbyt mocno i nie pojawiają się cechy niedokrwienia, takie jak bledność czy zasinienie.
9. Bandaż powinien być zmieniany zgodnie z instrukcją dla opatrunku pierwotnego. Jeśli opatrunek nie służy do przytrzymywania opatrunku jałowego, powinien być zmieniony kiedy ulegnie uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nie rzadziej niż codziennie.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU

- ◇ Wyrób przeznaczony do jednorazowego użytku, ponowne użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu
- ◇ Wyrób niejałowy, nie stosować bezpośrednio na rany czy uszkodzony naskórek
- ◇ Nie używać wyrobu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu
- ◇ Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone
- ◇ Opatrunek powinien być zakładany z zachowaniem zasad higieny.
- ◇ W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych takich jak: zaczerwienienie, świąd, wysypka, należy usunąć opatrunek i przerwać jego stosowanie.
- ◇ Miejsce aplikacji należy obserwować pod kątem możliwości wystąpienia infekcji (może objawiać bólem, zaczerwienieniem, obrzękiem wokół miejsca aplikacji lub gorączką). Jeśli w trakcie stosowania opatrunku wystąpi podejrzenie infekcji należy usunąć taśmę i dokonać oględzin miejsca aplikacji w celu podjęcia dalszych decyzji terapeutycznych.
- ◇ Produkt zawiera lateks. Nie stosować u osób uczulonych.
- ◇ Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywać w pomieszczeniach, w których utrzymana jest stała temperatura w przedziale od +5 do +35 °C, a w wilgotności od 35% do 70%